

Aanpasadvies Kisu 1month Multi Toric

Verte: Bepaal de vertesterkte en refractioneer deze maximaal in de plus uit.

Bepaal het sensorisch dominante oog.

Nabij: bepaal een zo laag mogelijke additie.

Bril-additie	Beide ogen
+0,75D tot +1,75D	Kisu Near design
+1,75D tot +2,50D	Kisu Distance design

Initiële lenskeuze: Kisu Near design		
Nabij-zicht aanpassen	Dominante oog	Niet-dominante oog
Optie 1	CN	CN +0,25D/+0,50D
Optie 2	CD max. additie	CN
Vertezicht aanpassen		
Optie 1	CN -0,25D/-0,50D	CN
Optie 2	CD	CN

Initiële lenskeuze: Kisu Distance design		
Nabij-zicht aanpassen	Dominante oog	Niet-dominante oog
Optie 1	CD	CD +0,25D/+0,50D
Optie 2	CD	CD max. additie
Vertezicht aanpassen		
Optie 1	CD -0,25D/-0,50D	CD
Optie 2	Individual Toric/Miru Toric	CD

Initiële lenskeuze: Kisu Near design		
Nabij-zicht aanpassen	Dominante oog	Niet-dominante oog
Optie 1	CN	CN +0,25D/+0,50D
Optie 2	CD max. additie	CN
Vertezicht aanpassen		
Optie 1	CN -0,25D/-0,50D	CN
Optie 2	CD	CN

Initiële lenskeuze: Kisu Distance design		
Nabij-zicht aanpassen	Dominante oog	Niet-dominante oog
Optie 1	CD	CD +0,25D/+0,50D
Optie 2	CD	CD max. additie
Vertezicht aanpassen		
Optie 1	CD -0,25D/-0,50D	CD
Optie 2	Indivisual Toric/Miru Toric	CD

Wanneer je voor het ene oog een Kisu hebt gekozen, maar het andere oog sferisch is, kan je voor Miru 1month met additie Low kiezen. De additie High wordt niet aanbevolen omdat deze een gedecentreerd leesdeel heeft. Een ander alternatief is de Indivisual.

Problemen verte

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus? De maximale visus is niet altijd haalbaar bij multifocale lenzen. Wanneer de visus 80-90% van de normale visus is, kan men doorgaans tevreden zijn met het resultaat.
- Geeft een overrefractie nog verbetering? Hoeveel verbetering geeft S-0.25 (voor het dominante oog)?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd? We zien vaak dat er een distance lens op het oog geplaatst wordt terwijl het advies eigenlijk een near lens is.

Problemen lezen

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus voor de verte en nabij? Is de visus voor nabij echt zo slecht dat deze aangepast moet worden? Als de consument zijn werk goed kan doen, maar op de leeskaart niet het kleinste kan lezen, hoeft je niet verder te sleutelen. Geeft een overrefractie in de plus nog verbetering voor het lezen, zonder dat dit ten koste gaat van de visus voor veraf?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd? We zien vaak dat er een distance lens op het oog geplaatst wordt terwijl het advies eigenlijk een near lens is.
- Geef het niet dominante oog nog S+0.25 of S+0.50 bovenop de vertesterkte.
- Verhoog de additie als al het bovenstaande geen verbetering geeft.