


Aanpasadvies Miru 1day UpSide

Verte: Bepaal het sferisch equivalent van de vertesterkte en refractioneer deze maximaal in de plus uit.

Bepaal het sensorisch dominante oog.

Nabij: bepaal een zo laag mogelijke additie.

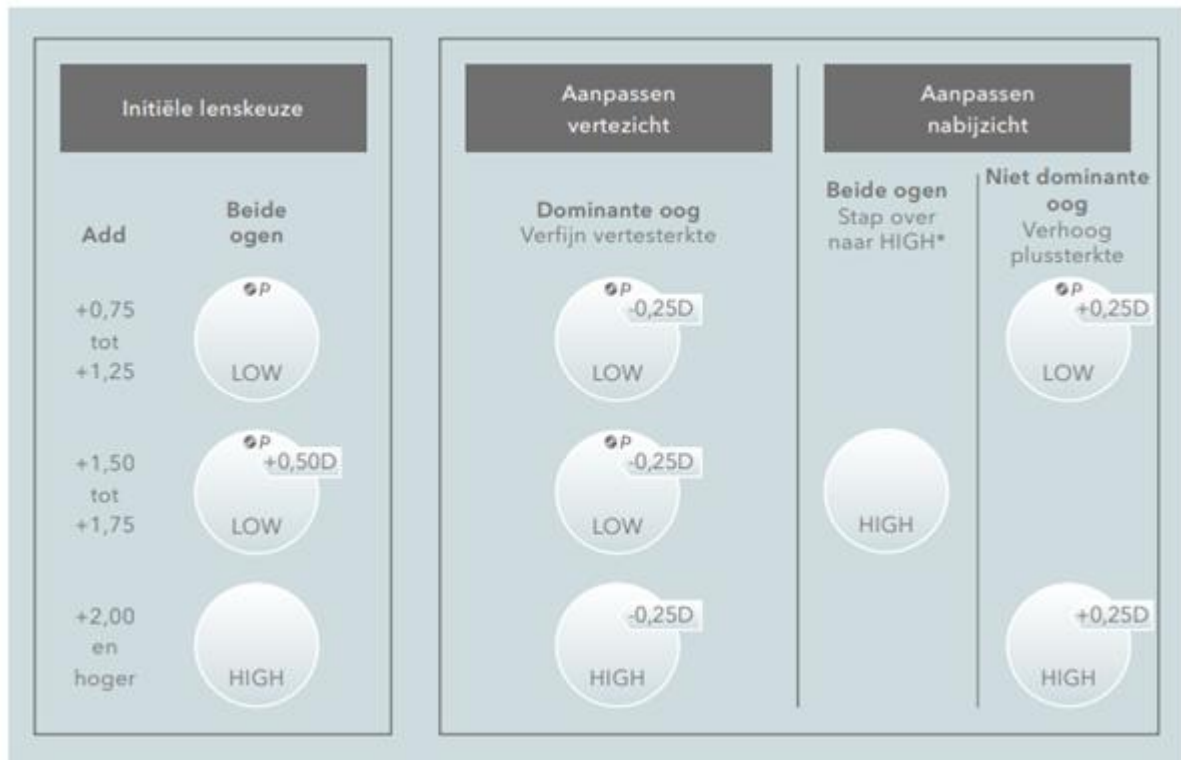

* verwijder bij HIGH de extra +0.50D toegevoegd bij de initiële lensselectie.

Problemen verte

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus? De maximale visus is niet altijd haalbaar bij multifocale lenzen. Wanneer de visus 80-90% van de normale visus is, kan men doorgaans tevreden zijn met het resultaat.
- Geeft een overrefractie nog verbetering? Hoeveel verbetering geeft S-0.25 (voor het dominante oog)?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd?

Problemen lezen

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus voor de verte en nabij? Is de visus voor nabij echt zo slecht dat deze aangepast moet worden? Als de consument zijn werk goed kan doen, maar op de leeskaart niet het kleinste kan lezen, hoef je niet verder te sleutelen. Geeft een overrefractie in de plus nog verbetering voor het lezen, zonder dat dit ten koste gaat van de visus voor veraf?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd?
- Geef het niet dominante oog nog S+0.25 of S+0.50 bovenop de vertesterkte.