

Aanpasadvies Miru 1month

Verte: Bepaal het sferisch equivalent van de vertesterkte en refractioneer deze maximaal in de plus uit.

Bepaal het sensorisch dominante oog.


Nabij: Bepaal de laagst mogelijke additie.

Initiële lenskeuze			Verbetering nabijzicht		Verbetering vertezicht		OF	Verbetering vertezicht	
Add	Dominante oog	Niet dominante oog	Dominante oog	Niet dominante oog	Dominante oog	Niet dominante oog		Dominante oog	Niet dominante oog
+0,75 tot +1,75	 LOW	 LOW	 LOW	 +0,25D LOW	 -0,25D LOW	 LOW		 HIGH	 HIGH
+2,00 tot +2,50	 HIGH	 HIGH	 HIGH	 +0,25D HIGH	Verbetering van het vertezicht is overhet algemeen niet nodig voor dragers van het HIGH design vanwege de gedecentreerde nabij zone.				

Het heeft de voorkeur om deze lenzen binoculair gelijk aan te meten. Mocht dit toch niet voldoende zijn, dan is aanmeten op basis van dominantie ook mogelijk. Plaats dan op het dominante oog de Low variant, en op het niet dominante oog de High variant.


LOW design

Progressief concentrisch ontwerp
Add. $\leq +2,00$ dpt

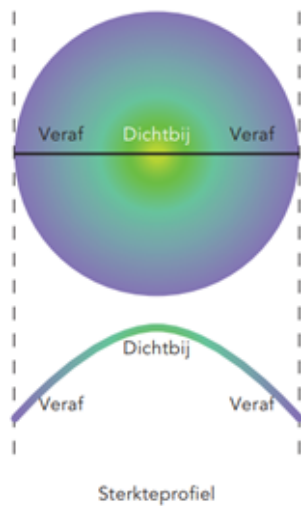

HIGH design

Dual Balanced decentraal ontwerp
Add. $\geq +2,25$ dpt

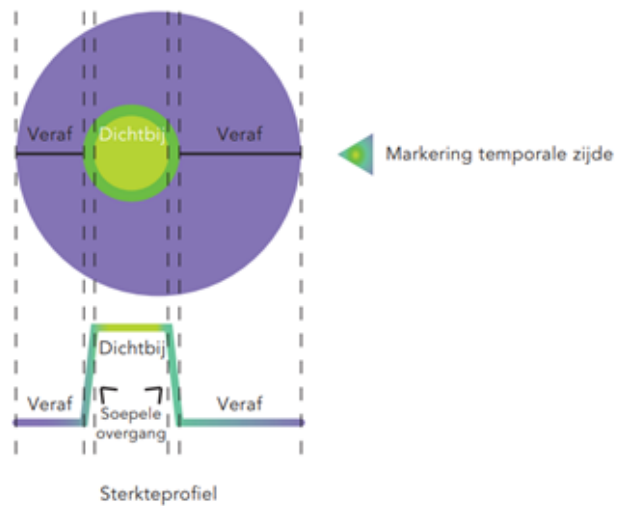

Problemen verte

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus? De maximale visus is niet altijd haalbaar bij multifocale lenzen. Wanneer de visus 80-90% van de normale visus is, kan men doorgaans tevreden zijn met het resultaat.
- Geeft een overrefractie nog verbetering? Hoeveel verbetering geeft S-0.25 (voor het dominante oog)?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd?

Problemen lezen

- Is de passing goed? Een slecht passende lens zal altijd visusklachten geven. Als de basis niet goed is, is het aan te raden dit eerst op te lossen.
- Wat is de visus voor de verte en nabij? Is de visus voor nabij echt zo slecht dat deze aangepast moet worden? Als de consument zijn werk goed kan doen, maar op de leeskaart niet het kleinste kan lezen, hoeft je niet verder te sleutelen. Geeft een overrefractie in de plus nog verbetering voor het lezen, zonder dat dit ten koste gaat van de visus voor veraf?
- Komt er een hele gekke of hoge overrefractie uit, ga dan terug naar de basis. Meet eens zonder lenzen, of pak een vertelens en doe daar een goede overrefractie overheen.
- Zit het juiste design op het oog? Ofwel; is het aanpasadvies gevolgd?
- Geef het niet dominante oog nog S+0.25 of S+0.50 bovenop de vertesterkte.