## Medmont (3, 5, 6 en 7) topograaf - koppelen en gebruiken

Klik, om te beginnen, op de Medmont-button boven aan in Easyfit.



Staat het pictogram van de Medmont nog niet in je menubalk, ga dan even naar het Instellingenmenu rechts boven in Easyfit en selecteer de juiste Medmontversie die je hebt.



## Selecteer vervolgens de betreffende patiënt.



Selecteer de beelden van de patiënt die je wilt importeren in Easyfit.

Patièrten #	Tasparsoon 8, M. 23-jul-2121 13:15:15; Rechts - Axiaal vermogen	10	Testpersoon 8. M. 27-jul-2021 10/06/24; Unks - Axiaal vermogen	1
72-44-2021         12-94-2021         12-94-2021           72-44-2021         12-94-2021         12-94-2021           72-34-2021         12-94-2021         12-94-2021           72-34-2021         12-94-2021         12-94-2021           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-95-204           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91           72-34-2021         12-10-91 <t< th=""><th>45,54 44,25 44,25 45,64 45,56 45,66 45,97 90,78 90,79 90,78 90,79 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,700</th><th>Conserved to the second second</th><th>45,14 44,25 42,44 41,56 45,70 38,79 37,70 36,20,</th><th>O II E E E ← Viakke K 42. Swite K 43. JX Viak ← Swite IS-index 5. Site IS-index 5. Site IS-index 5. Site IS-index 6. Site IS</th></t<>	45,54 44,25 44,25 45,64 45,56 45,66 45,97 90,78 90,79 90,78 90,79 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,700	Conserved to the second	45,14 44,25 42,44 41,56 45,70 38,79 37,70 36,20,	O II E E E ← Viakke K 42. Swite K 43. JX Viak ← Swite IS-index 5. Site IS-index 5. Site IS-index 5. Site IS-index 6. Site IS

Voor het importeren van de beelden in Easyfit vanuit de Medmont 3 klik je op 'Koppelingen' en vervolgens op 'Easyfit lensberekening'.



Voor het importeren van de beelden in Easyfit vanuit de Medmont 5, 6 en 7 klik je bij het tabblad 'Home' op 'Easyfit lensberekening'.

m)   S Medmont Studio								- a ×			
Bestand	Hore	Configur	eren Wee	geven	Analyse	Rapporten	Display	Aantekenen			÷ 0
Q. Vinder	Neer	22	Verplaatsen	Ropieren	Verwijdere	Correction of the second	Contactions	ton-organ	Organiseren	<ul> <li>Qi quayfit verschilbeelden</li> <li>Qi quayfit e-mailadules</li> <li>Qi quayfit lensbereikening</li> </ul>	
	Patier	e		Onderzoe	k .	Nieuw	onderzoek		Favorieten	Gekoppelde toepassingen	

Tare -Testpersoon 8, M. (m) n details the 7.67 -217 8.00 1.82 Di Di 7,58 7.77 Az-visk e rad 7,67 160 te rad 7,83 0,79 E-viak. E-MIR 0,76 C Add. C. Add 32 A6 iber een waarde in tusten -40.00 en 20.00 Nacht Medisch Nacht Medisch Tangentiaal Vormvast Tancentian 100 1 / Sagittaa een lens te kunnen berekenen en de velden hierboven ingevuid te den. De geel gemarkeerde velden anslicht Om een iens te kunnen berekene dieren de velden hierboven ingevuld te worden. De geel gemarkeerde velden zijn verplicht.

De beelden voor zowel OD als OS zullen naar Easyfit worden geëxporteerd.