

Nidek OPD-Scan III - koppelen en gebruiken

Open de Nidek OPD Scan III software.

Selecteer Instellingen in het hoofdmenu > Selecteer het tabblad Gegevensuitvoer.
Zorg ervoor dat de instellingen gelijk zijn aan de instellingen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven

The screenshot shows the 'Data Output' tab of the Nidek OPD-Scan III software. The window has tabs for 'Print', 'Communication', 'Data Output', 'Summary', and 'Param'. The 'Data Output' tab is active and contains the following settings:

- Data Output:**
 - ☐ Set Each Time
 - ☐ Output Settings for NAVIS
- Configuration:**
 - ☒ Summary Image
 - ☒ Text Data
 - ☒ RT Data
- Common Settings:**
 - Save Folder:** C:\SCAN3OUT (with a 'Ref' button)
- File Name:**
 - ☒ Patient's ID
 - ☐ Patient's Name
- ☐ Privacy Protection
- Image File Format:**
 - ☐ BITMAP
 - ☒ JPEG
- COM Port settings:**
 - COM Port number:** COM1 (with a dropdown arrow)

Open Easyfit.

Selecteer Instellingen > Selecteer het tabblad Topograaf.
Selecteer de Nidek OPD-Scan III.

The screenshot shows the 'Settings' window in Easyfit, with the 'Topographer' tab selected. The window has tabs for 'General', 'Company', 'Topographer', 'Database', and 'Backup'. The 'Topographer' tab contains a list of topographers to select from. The 'Nidek OPD-Scan III' option is highlighted with a red box.

Please select your topographer from the following list

- ☐ I don't want to use a topographer
- ☐ BON Eyetop
- ☐ Cassini
- ☐ Essilor AnaEyes
- ☐ EyeTop 2005
- ☐ Haag-Streit
- ☐ Keratron
- ☐ Medmont (version 3)
- ☐ Medmont (version 4)
- ☐ Medmont (version 5)
- ☐ Medmont (version 6)
- ☒ Nidek OPD-Scan III
- ☐ Oculus Easygraph
- ☐ Oculus Keratograph
- ☐ Oculus Pentacam
- ☐ Phoenix
- ☐ Rodenstock DNEye Scanner
- ☐ Shin-Nippon CT-1000
- ☐ Tomey RT-7000
- ☐ Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4
- ☐ Topcon 7000
- ☐ Topcon 8100 (CA-100 software)
- ☐ Topcon 8100 (Color Mapping software)
- ☐ Topcon CA-100 / CA-1000
- ☐ Topcon CA-800
- ☐ Visionix VX-120
- ☐ Zeiss i.Profiler
- ☐ Zeiss i.Profiler plus

OK Cancel

Na het klikken op OK moet de Nidek-knop worden weergegeven in de menu-bar.



Meetgegevens overbrengen naar Easyfit


Open Easyfit.

Selecteer de Nidek-knop in de menubalk. De Nidek OPD Scan III-software moet starten.

Selecteer Patiëntendossiers in het hoofdmenu.

Dubbeltklik op de patiënt binnen het patiëntenoverzicht waarvan u de meetgegevens wilt importeren in Easyfit.

Selecteer een van de foto's in de rij foto's waarvan de bijbehorende meetgegevens naar Easyfit moeten worden geëxporteerd (hieronder is bijvoorbeeld een afbeelding van "meetrij 11" geselecteerd (gemarkeerd met een groen vierkant)).

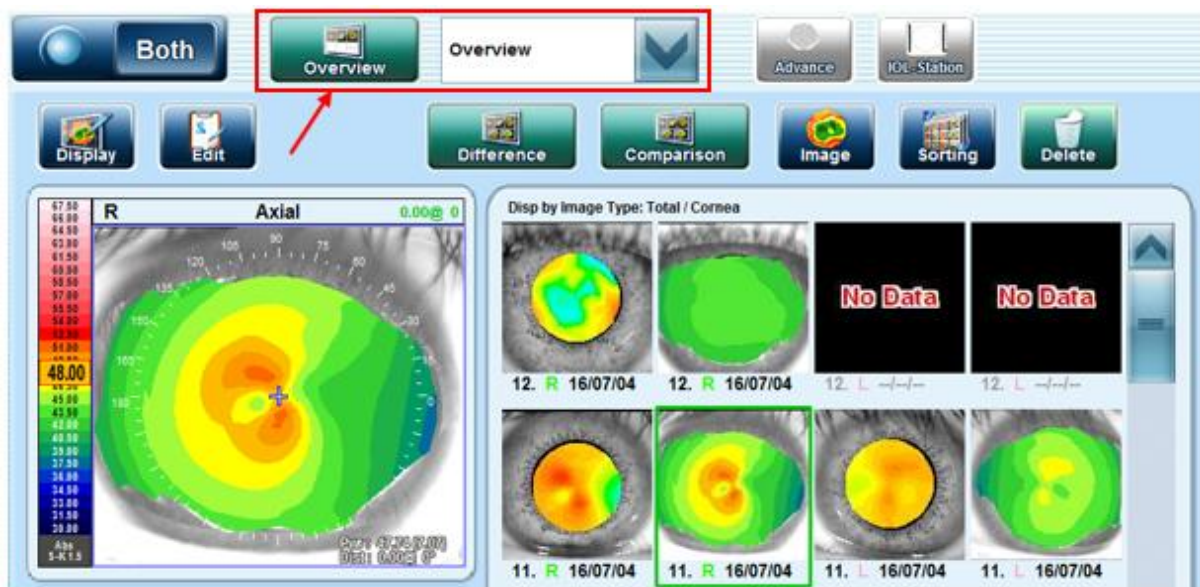

Zorg ervoor dat Overzicht is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu bovenaan het scherm en selecteer vervolgens de knop Overzicht (zie de pijl in de bovenstaande afbeelding).

Selecteer in het scherm Overzicht de knop Extra, gevolgd door Uitvoer corneagegevens in het vervolgkeuzemenu.



De Nidek OPD Scan III software toont het bericht zoals hieronder aan de linkerkant. Daarna verschijnt er een Easyfit-pop-up in de rechterbenedenhoek; zie de rechterfoto hieronder. Door Importeren in Easyfit te selecteren worden de meetgegevens geïmporteerd in Easyfit.

