## Oculus Keratograph - koppelen en gebruiken

Selecteer in het Instellingenmenu de Oculus Keratograph.

Algeme	en Bedrijf	Topograaf	Mod	ules	Database	Backup			
ies uw	topograaf u	it de volgend	e lijst						
	Ik wil geen t	opograaf geb	ruiker	1					
0	BON Eyetop		0	Medmont (version 6)		0	Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4		
0	Cassini		0	Medmont (version 7)		0	Tomey TMS-5		
0	CSO Sirius		0	Nidek OPD-Scan III		0	Topcon 7000		
0	Essilor Anal	Eyes	0	Oculus Easygraph		0	Topcon 8100 (CA-100 software)		
0	Essilor WAN	A 700(+) / 80	0 💿	Ocu	ilus Keratog	raph	0	Topcon 8100 (Color Mapping software)	
0	EyeTop 200	15	0	Ocu	ilus Pentaca	im	0	Topcon CA-100 / CA-200	
0	Haag-Streit	8	0	Pho	enix		0	Topcon CA-800	
0	Keratron		0	Rex	xam RET-70	00	0	Visionix VX-120	
0	Medmont (	version 3)	0	Rod	ienstock DN	Eye Scanner	0	Visionix VX-205	
0	Medmont (	version 4)	0	Shir	n-Nippon C	T-1000	0	Zeiss i.Profiler	
0	Medmont (	version 5)	0	Ton	ney RT-7000	0	0	Zeiss i.Profiler plus	

Klik op het pictogram van de Oculus in de menubalk van Easyfit en de software van de Oculus Keratograph wordt geopend.



Selecteer de meting van de klant in de patiëntenlijst die je wilt importeren in Easyfit. Wanneer je de Ctrl-knop ingedrukt houdt kun je direct meerdere metingen selecteren. Zodra je de metingen hebt geselecteerd, klik je op Keratograph, zodat de beelden in de Keratograph software worden ingelezen.

abert.				Fur	ctions.								
Last name:	A		New		Perta	am					s	ettings	
Fint name:	μ.κ.		Change		Kender	1				-			
Dat.o.8	15-5-1983		Search		Neraling	a dan						ackup	-
ID Number:	16158										_	End	_
iert lat				Prend	ous exami	vations:							
Lastnane	/ Festname	Date of bith	ID			Date	Time	Device	Eve	Type of	informat	Best	0
A.,	16	15-5-1983	15158		-		1000	Marrie .		exam.		1.000	-
				T-	50	22-10	09.53	Kernete	Durie	Tanan			
					51	26-5-2	11.39	Kerato	Left	Tepos	Tusse		-
					50	26-9-2	11.38	Keneto	Rolt	Tapoa	Tutte		t
					49	19-9-2	11.44	Kerato	Left	Tapog	Tusse		t
					45	19-9-2	11:44	Kerato	Right	Tapog	Tume		t
					47	9-9-20	14:07	Kerato	Left	Topog	Tusse		Т
					45	5-5-20	14.07	Kerato	Right	Topog	Tusse		Т
					45	11-8-2	09:54	Kerato	Left	Topog			Γ
					44	11-8-2	09:53	Kerato	Right	Topog			Γ
					43	17-7-2	09.51	Kerato	Left	Тород			
					42	17-7-2	05.50	Kerato	Right	Tapog			
					41	28-3-2	10:51	Kerato	Left	Topog		_	
					40	28-3-2	10:50	Keralo	Right	Topog	-		
					39	19-9-2	09:55	Kerato	Left	Tapog			1
					38	19-9-2	09.54	Kerato	Right	Topog	<u> </u>		1
				1.1	37	22-2-2	11:41	Kerato	Left	Topog.			1
				1.141									

Je klikt op **Examination** en daarna op **Load**.

Patient Examination Display Setting	s Help Print JPG External Softwa	re
New Pater Load Date of birth: 15-5-19i Patient ID: 16158	Exam. date: Eye: Yown QS:	z oculus

Je selecteert de meting die je wilt importeren en met een dubbelklik wordt de meting geopend. De metingen kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.

vrijdag 23 oktober 2020	
#53 Topography	#52 Topography
09:53 / Left	09:53 / Right

Je klikt op External Software en daarna op Easyfit.



Er verschijnt een melding dat het rechterbeeld klaar staat om geïmporteerd te worden. Deze melding sluit je middels het kruisje af. Je herhaalt de stappen 4 en 5 om ook het linker topobeeld in te lezen in Easyfit. Wanneer je het linker topobeeld hebt ingelezen, krijg je onderstaande melding in je scherm te zien en klik je vervolgens op **Importeren in Easyfit**.



Je topobeelden zijn ingelezen in Easyfit.

