## Oculus Pentacam - koppelen en gebruiken

Selecteer in het Instellingenmenu de Oculus Pentacam.

-	ten beorgi robograat	100	vies   Liatabase   Backup		
s uw	topograaf uit de volgende	lijst			
9	3k wil geen topograaf gebru	sker			
0	BON Eyetop	0	Medmont (version 6)	0	Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4
0	Cassini	0	Medmont (version 7)	0	Tomey TMS-5
0	CSO Sinus	0	Nidek OPD-Scan III	0	Topcon 7000
0	Essilor AnaEyes	0	Oculus Easygraph	0	Topcon 8100 (CA-100 software)
0	Essilor WAM 700(+) / 800	0	Oculus Keratograph	0	Topcon 8100 (Color Mapping software)
0	EyeTop 2005	۲	Oculus Pentacam	0	Topcon CA-100 / CA-200
0	Haag-Streit	0	Phoenix	0	Topcon CA-800
0	Keratron	0	Rexxam RET-700	0	Visionix VX-120
0	Medmont (version 3)	0	Rodenstock DNEye Scanner	0	Visionix VX-205
0	Medmont (version 4)	0	Shin-Nippon CT-1000	0	Zeiss i Profiler
0	Medmont (version 5)	0	Tomey RT-7000	0	Zeiss i.Profiler plus

Klik op het pictogram van de Pentacam in de menubalk en de Pentacam software wordt geopend.



Selecteer de meting van de klant in de patiëntenlijst die je wilt importeren in Easyfit. Wanneer je de Ctrl-knop ingedrukt houdt kun je direct meerdere metingen selecteren. Zodra je de metingen hebt geselecteerd, klik je op Pentacam, zodat de beelden in de Pentacam software worden ingelezen.

					Functi	ions.	_					
Last name: Testpersoon 2.			New		Pentac	am				Setti	ngs	
Fint name: N.			Change		Eanvor	mah				Baci	aup	
Dat. o. B: 20-4-1976			Search								-	
10 Number: 208852					Keratograph				End			
lat:					Previou	s examin	ations:					
Lastname	/ Entname	Date of bith	ID .			# \	Date	Time	Device	Eye	Type of	infoted
Testpersoon 2.	N.	20-4-1976	208852			2	25-1-2021	12:37:55	Pentacam	Lett	(25) 3D-Scan HR	
Testpersoon 4	L	15-7-1992	171232				25-1-2021	12:36:47	Pentacam	Right	(25) 3D-Scan HR	
Testpersoon 5.	D.	2-9-1984	291093									
Testpersoon 8	M.	12-12-1968	163285									

Onderstaande afbeelding verschijnt nu op je scherm en je klikt hierna op 'Examination' en daarna op 'Load'.

6) OCULIS - FENTALAM Overview Patient Examination Display Settings			- 0	D X JPG Print
	Examination Load Scan	Contract Nored	Lat Name         For Name           D         Den Epe           D         Den Epe           Seam Dark         Epe           Seam Dark         Epe           Part Dark         Trace           Part Dark         Name           Part Dark         Partice           Present (Loot: 0         Partice           Darker Volane         Ange           A & Snyth Sex ()         Papition	430 440 420 440 440 440 440 440 440 440 44
Stew         Fit           Carees Root         SP         SP           Carees Root         SP         SP           Init         SP         SP           Lens Root         SP         SP           Lens Root         SP         SP           Carear Videb         SP         SP           Carear Videb         SP         SP           Carear Videb         SP         SP           Namadee         Annuelle         Lanstate			Emerging Officient         # Conset           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0	600 600 600 700 700 700 700 700 700 700

Je selecteert eerst de rechter meting en daarna de linker, allebei tegelijkertijd gaat helaas niet en klikt vervolgens op OK.

Defert         Examination         Display         Settings         IfG         Pril           Contest Normal         Last Name:         Textpersoon 2. First Name:         M         M         M         M           Load Examination         Contest Normal         Last Name:         M.         M <th>By OCULUS - PENTACAM Overv</th> <th>ew - [</th> <th>×</th>	By OCULUS - PENTACAM Overv	ew - [	×
Load Examination         40           01/25/2021         12:37:55         Left         (25) 3D. Scan HR         40           01/25/2021         12:37:55         Left         (25) 3D. Scan HR         500           01/25/2021         12:37:55         Left         (25) 3D. Scan HR         500           01/25/2021         12:37:63         Right         (23) 3D. Scan HR         500           01/25/2021         12:36:47         Right         (23) 3D. Scan HR         500	Patient Examination Display 1	Contrast Normal Last Name: Testpersoon 2.     First Name: N.	1PG Print
01/25/2021         12-36:47         Right         (25) 3D. Scan HR         500           C-vel,         (Brm)         500         500           Vel,         (Brm)         500         50		Load Examination         Eye.           01/25/2021         12:37:55         Left         (25) 3D-Scan HR	410 430
Image: Solution of the second secon		01/25/2021 12-36:47 Right (25) 3D-Scan HR	510
Image: Section of the sectio			500 540 550
Angie 50 Angie 60 Pupi Dia 60 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50			500 == 570 == 580 ==
8 Corres[ 140		Angle Pupel Dia	530 600 610
		Ø Correa	620 630 640
Show         Fill         80           Comes Find         IP         IP         60	Show Fill Comes Front IP IP	*	650 660 670
CorresBack P P (1)	Comes Back IP IP Im IP IP Leve Front IP IP	t.	680 690 700
Leve Back 17 17 Scale 17 17 00 200	Lens Back IP IP Scale IP IP		710 720 720
Cutout Width 60 +	Cutout Width 60"		740 750
Nomake Avinate	Nomake Avinate	8	Pachy.

De meting verschijnt en automatisch komt er een pop-up venster met de melding dat rechts klaar is voor het importeren. Omdat je in de meeste gevallen twee topobeelden wilt inlezen, klik je bij deze melding op het kruisje.



Je klikt via 'Examination' de linker meeting aan.

OCULUS - PENTACAM Overview	1	- 0	X
Patient Examination Isplay Set	tings		JPG Print
R 1/3	Segnent 50° - 230° 🖌 💶 Contrast Normal Last Name: Testperson	n2.	390
2/25	Segnent 66' - 245' A Part Fait Name: N		410
	pad Examination	Eye: Right	420
	01/25/2021 12:37:55 Left (25) 3D-Scan HR	Tine 123647	430
	01/25/2021 12:36:47 Right (25) 3D-Scan HR	Astig 0.60	450 =
36.0 *		Q-val_0.74	450 =
		OS: IOK	470 =
			490 =
		- (nn) y nn]	500 =
			510 =
		1034 1028	530 =
		* Angle: 45.9 *	540 ==
		🕎 Pupi Dia: 2.92 nm	560
		Hg Ø Camea 121 mm	570
			500
Show Fill			600
Comes Front IV IV		, OD	610
		a second	620
Lens Front 🔽 🖓		623	640
Lens Back 🔽 🖓		400 609	650
Scale 🔽 🖓	City Court	<b>1</b>	660
04043W645	Un Cancer	510	680
Const Pro		m 50 3	690
	210 330 8		5 µm
	240 300 T 40.	270* S N	Pachy.
Normalize Animate	<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	0 4 8	Rel

Er verschijnt opnieuw een pop-up venster met de melding dat alles klaar staat voor importeren in Easyfit. Zodra je hier op hebt geklikt worden beide topometing in Easyfit geïmporteerd.



