Rexxam RET-700 - koppelen en gebruiken

Schakel de topograaf in.



Selecteer het tweede symbool van boven aan de rechterkant van het display Tik op **Instellen**

	-		
REF/KRT 1	Exam data	External	Off
REF/KRT 2	Terminal	USB-A	USB-B
Topographer	Shared folder	Enter	2
Contact lens	Network	Enter	
Option	Import/ Export	Enter	
Save 2	1		
Printer			
Registration			

- 1. Selecteer Opslaan 1
- 2. Selecteer USB-A
- 3. Tik op Enter om het menu Importeren/exporteren te openen.

Internal			5 Exam	
ID	First name			
0012				
001	and the second se			
12345				
12345				
USB-A		Patient	0 Exam	0
ID	Last name First name			
-				
-				
AND ALL				

Selecteer Alle export

0012	And a second	
12345		
12345	All export?	B B
USB-A		0 Exam 0
ID		
	ОК	ancel
12345	Huizing	

Selecteer **OK**

Alle afbeeldingen worden geëxporteerd naar de USB-drive

Een enkele rexxam-afbeelding exporteren

Schakel de topograaf in Ga naar Setup

REF/KRT 1	Exam data	External	Off
REF/KRT 2	Terminal	US6-A	USB-B
Topographer	Shared folder	Enter	
Contact lens	Network	Enter	
Option	Import/ Export	Enter	
Save 1			
Save 2			
Printer			
Registration			

Selecteer **Opslaan 1** Selecteer **USB-A**



Selecteer het tweede symbool van boven aan de rechterkant van het display Selecteer **Examen openen**



- 1. Selecteer de patiënt
- 2. Selecteer de meting
- 3. Tik op Analyse



Meting wordt weergegeven, selecteer CL-fitting



Tik op Exporteren

De topografie wordt nu geëxporteerd naar de USB-drive

Om het andere oog te exporteren, selecteert u gewoon het andere oog boven aan het scherm en tikt u vervolgens nogmaals op Exporteren.

Gegevens importeren van Rexxam naar Easyfit

Kopieer eerst de bestanden van de USB-stick naar uw harde schijf. Kies een locatie en kopieer de bestanden. U kunt er ook voor kiezen om het USB-station op uw computer te gebruiken. Start Easyfit Ga naar Instellingen



Selecteer het tabblad Topograaf Selecteer de Rexxam

Algemeen	Bedrijf Topograaf	Mod	ules Database	Backup		
lies uw top	pograaf uit de volgende	e lijst				
🗆 Ik v	vil geen topograaf geb	ruiken				
Овс	ON Eyetop	0	Medmont (vers	ion 6)	0	Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4
0 0	issini	0	Medmont (vers	ion 7)	0	Tomey TMS-5
0 05	SO Sirius	0	Nidek OPD-Sca	en III	0	Topcon 7000
O Es	silor AnaEyes	0	Oculus Easygra	ph	0	Topcon 8100 (CA-100 software)
O Es	silor WAM 700(+) / 800	0	Oculus Keratog	raph	0	Topcon 8100 (Color Mapping software)
OEy	eTop 2005	0	Oculus Pentaca	im.	0	Topcon CA-100 / CA-200
Она	aag-Streit	0	Phoenix		0	Topcon CA-800
ОКе	eratron	۲	Rexxam RET-70	00	0	Visionix VX-120
Ом	edmont (version 3)	0	Rodenstock DN	Eye Scanner	0	Visionix VX-205
Ом	edmont (version 4)	0	Shin-Nippon C	T-1000	0	Zeiss i.Profiler
Ом	edmont (version 5)	0	Tomey RT-7000	0	0	Zeiss i.Profiler plus

Klik op de Rexxam-knop



Selecteer Gedeelde map en druk op OK



Selecteer de map op de harde schijf / USB-drive om de afbeeldingen te importeren



In dit geval is het USB-station geselecteerd. Het maakt niet uit welke kaart is geselecteerd, houd er rekening mee dat de map exportbestanden van de Rexxam moet bevatten.

Na het selecteren van de kaart wordt een nieuw venster geopend met patiënten en metingen

Import data from Rexxam	
Import data from Rexxam	
Search patient	donderdag 17 december 2020 16:26 R
	donderdag 17 december 2020 16:26 L
	2
\$ Q	Make difference maps 4
<u>3</u>	Cancel Import

- 1. Zoekveld
- 2. Metingen
- 3. Lijst vernieuwen / Kies een andere locatie om bestanden uit de Rexxam te importeren
- 4. Selecteer een meting druk op import en afbeeldingen worden zichtbaar in Easyfit