


Tomey TMS-5 - koppelen en gebruiken

Open de Tomey TMS-5 software door op het pictogram 'TOMEY Measurement' te klikken




Klik op de knop '**Search**' om alle patiënten te krijgen. U kunt ook de naam van een patiënt invoeren en vervolgens op '**Zoeken**' klikken.

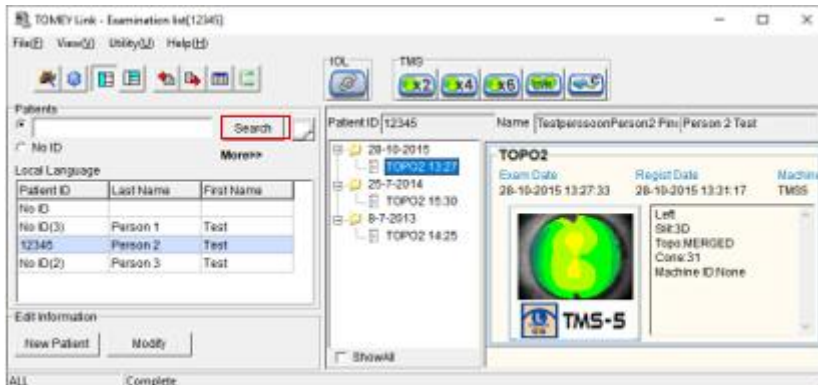


Selecteer de patiënt in de lijst die moet worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld 'Test Persoon2'.

Klik op het pictogram '**Gegevenstabellen**' om de exportfunctie van de TMS-5-software te openen

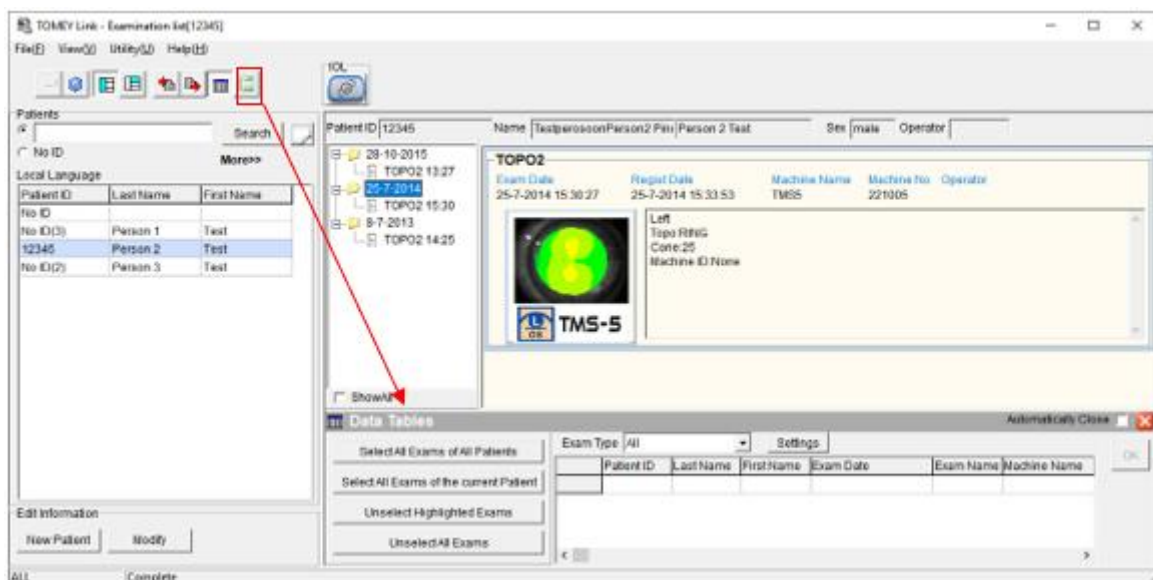


In de functie **Gegevenstabellen** kunnen de metingen van een enkele patiënt worden geselecteerd, of de metingen van meerdere patiënten. Voor dit voorbeeld zijn de examens van 'Test Persoon 2' geselecteerd.


Klik op '**Instellingen**'

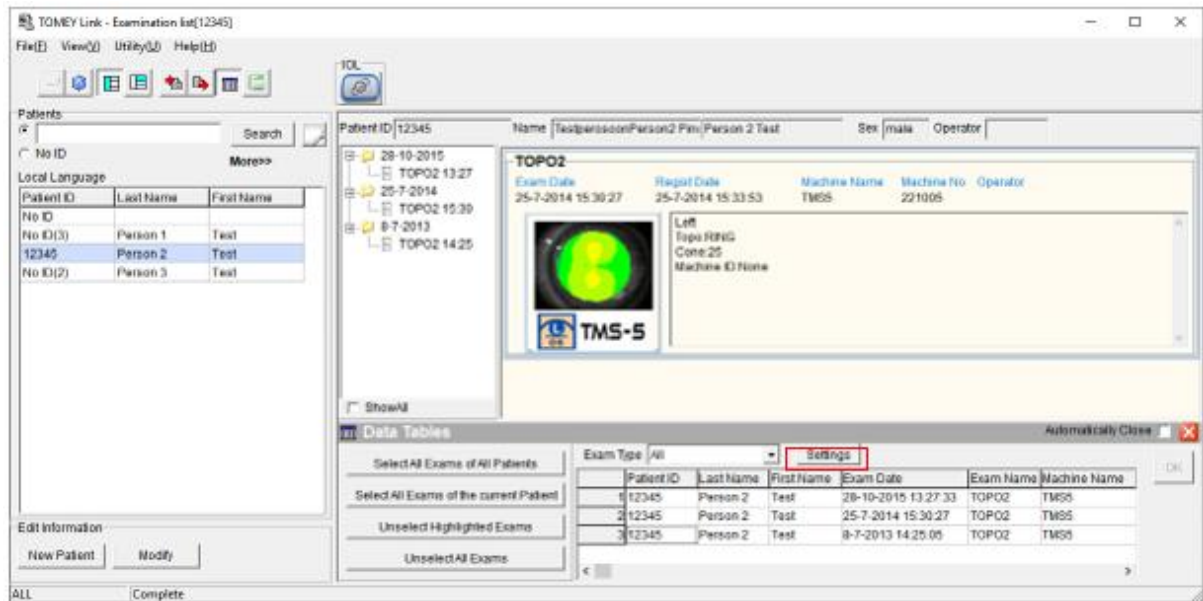


Controleer of de volgende standaardinstellingen worden gebruikt.

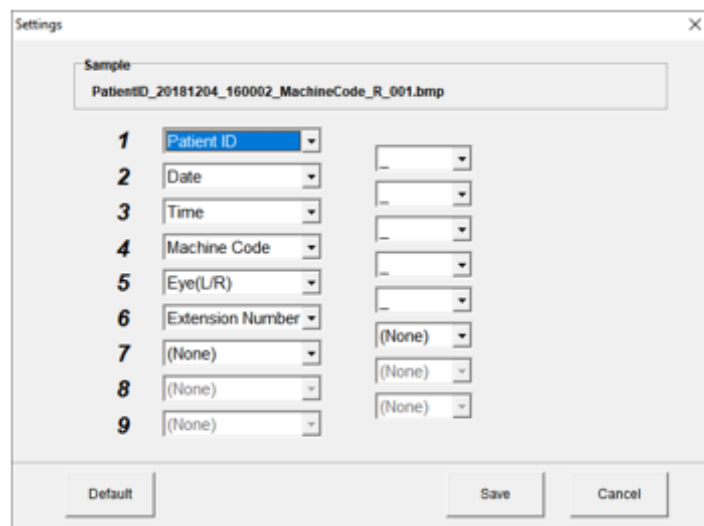

Selecteer in het keuzemenu Examentype '**TMS-5**', klik daarna op de knop '**OK**'. Hiermee wordt het menu exportinstellingen geopend, waarin de meting(en) kunnen worden geëxporteerd.

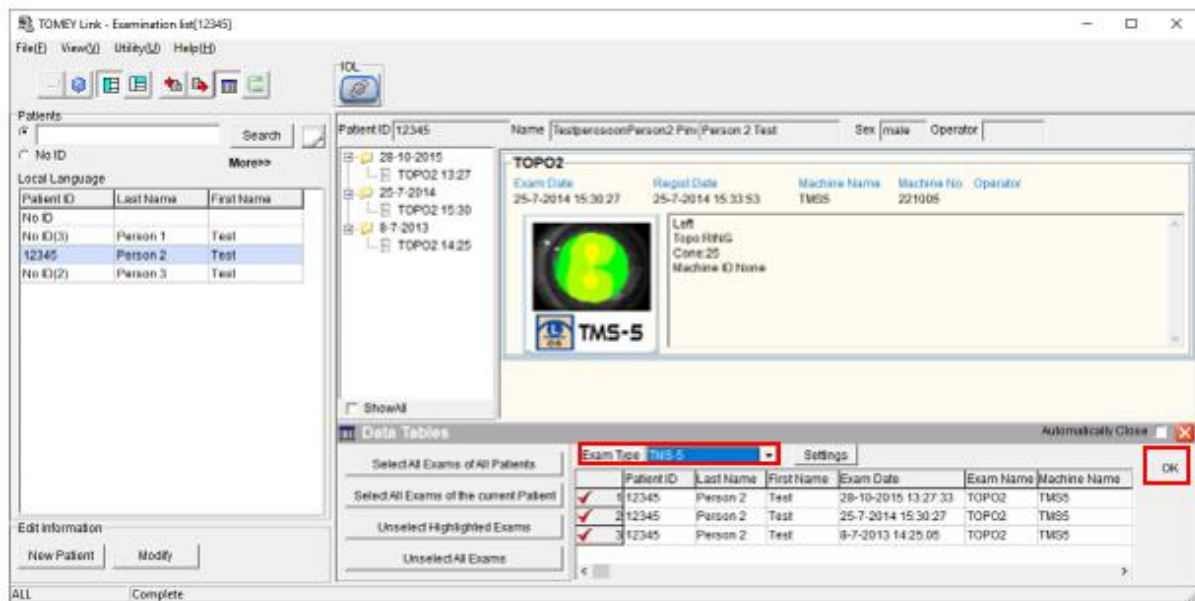


Gebruik de volgende exportinstellingen:

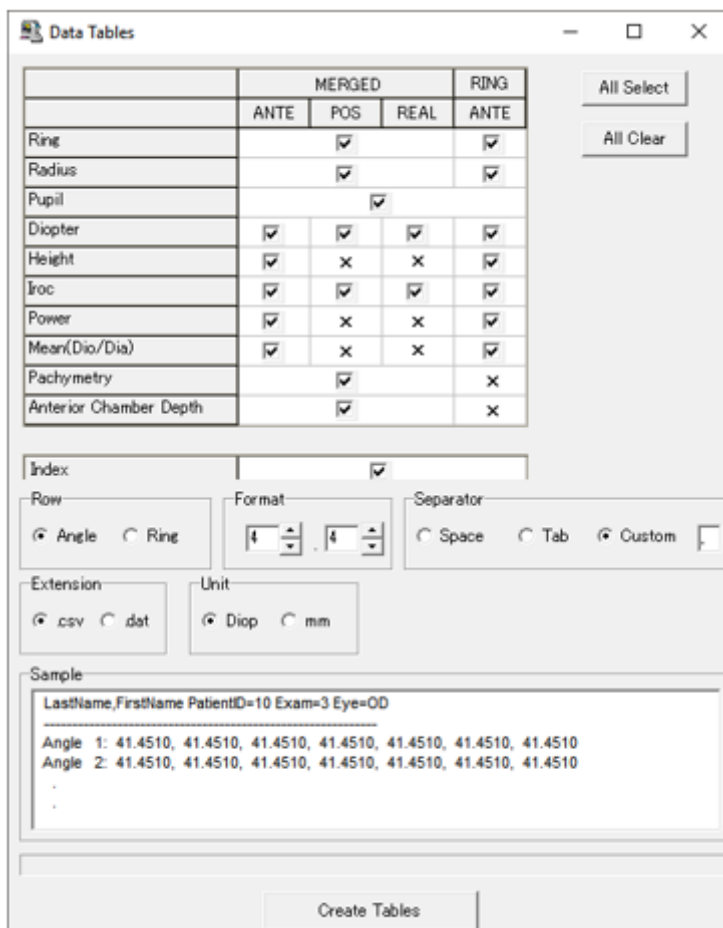


Wanneer de instellingen zijn zoals hierboven, klik dan op **'Tabellen maken'**.


Er verschijnt een mapselectiemenu. Selecteer/maak een map waarin de exportgegevens moeten worden opgeslagen en klik op **'OK'**. De geselecteerde map kan door Easyfit worden gebruikt om de topograafgegevens te importeren.

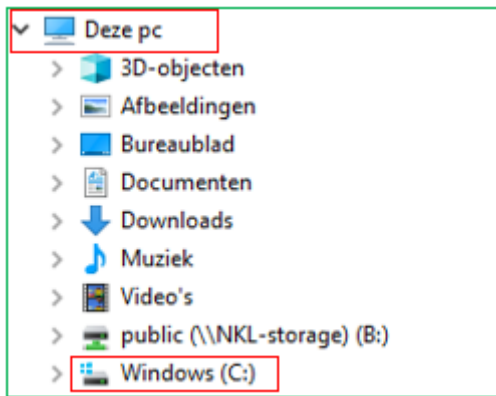


Open Easyfit, ga naar '**Instellingen**' en selecteer de Tomey TMS-5 topograaf in het tabblad '**Topograaf**'.

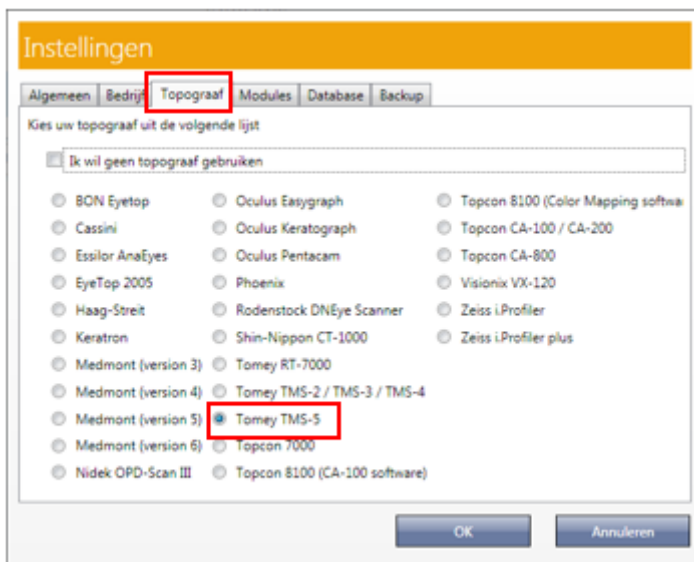


Nadat u op '**OK**' hebt geklikt, verschijnt de knop Tomey in de menubalk

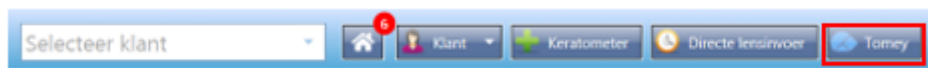

Klik op de knop Tomey om het importvenster te openen. Wanneer u de TMS-5 software vanuit EasyFit voor de eerste keer start, wordt het selectiescherm voor de importmap weergegeven. Gebruik dezelfde map die eerder is geselecteerd.

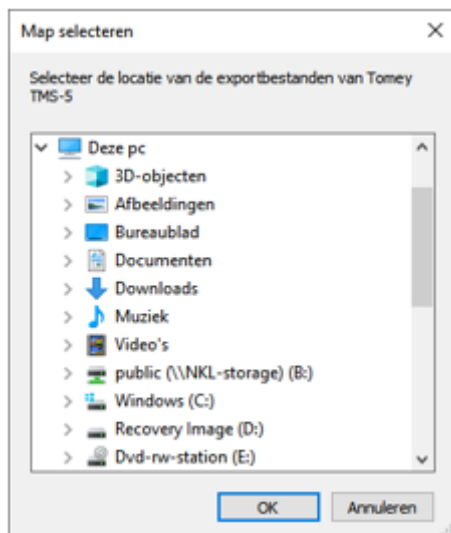

Na het selecteren van de juiste importmap worden alle geëxporteerde gegevens van de TMS-5 software weergegeven.

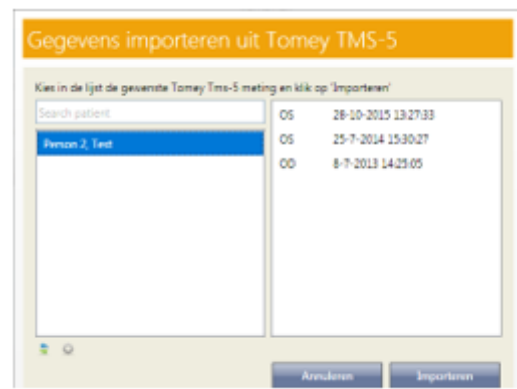

Bij het selecteren van een patiënt worden alle geëxporteerde metingen getoond. Selecteer de te importeren meting en klik op de knop '**Importeren**'. De topograafgegevens worden geïmporteerd in EasyFit.

