## Topcon CA-100 / CA-200 topograaf - koppelen en gebruiken

Om topografiebeelden te kunnen importeren in Easyfit, dien je je topograaf eerst te koppelen. Via het Instellingenmenu rechtsboven in Easyfit, selecteer je de topograaf.

Vigeme	en Bedrijf Topograaf	Mode	ules Database	Backup			
ies uw	topograaf uit de volgende	lijst					
	Ik wil geen topograaf gebr	uiken	κ.				
0	BON Eyetop	0	Medmont (version 6)		0	Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4	
0	Cassini	0	Medmont (version 7)		0	Tomey TMS-5	
0	CSO Sirius	0	Nidek OPD-Sca	an III	0	Topcon 7000	
0	Essilor AnaEyes	0	Oculus Easygra	ph	0	Topcon 8100 (CA-100 software)	
0	Essilor WAM 700(+) / 800	0	Oculus Keratograph		0	Topcon 8100 (Color Mapping software	
0	EyeTop 2005	0	Oculus Pentaca	m	۲	Topcon CA-100 / CA-200	
0	Haag-Streit	0	Phoenix	8	0	Topcon CA-800	
0	Keratron	0	Rexxam RET-70	00	0	Visionix VX-120	
0	Medmont (version 3)	0	Rodenstock DN	VEye Scanner	0	Visionix VX-205	
0	Medmont (version 4)	0	Shin-Nippon C	T-1000	0	Zeiss i.Profiler	
0	Medmont (version 5)	0	Tomey RT-700	0	0	Zeiss i.Profiler plus	

Vervolgens vind je het topograaficoontje terug in de menubalk van Easyfit.



Via dit icoontje beland je direct in je topograaf-software en kun je de klantgegevens erbij zoeken die je wilt importeren in Easyfit.

naal koulyser ekon Zoeten Sotistieken Topografie Weerge-	Alfokker Informatie			
Arthurson TESTPERSON III	Enhancement	Patient ID		
Roos  2	Patient states	Patientgegevens		
272.53021 CA200 I 273.53021 CA300 F 273.53021 CA300 F 273.52021 CA300 F 273.52021 CA300 F		Vicien		3
Datandaj nas oddolok Souti andecok Dagnosi Grae	Endwarden -			
Beachrang				05
	@		85 GR	62EM 05

Klik op Contactlenzen.



Klik vervolgens op **Opties**, dan op **Opdruk lenzen** en daarna op **Easyfit lensberekening**. Er verschijnt een melding rechts onderin je beeldscherm dat het rechter topobeeld geïmporteerd kan worden. Deze melding klik je weg, omdat je het linker topobeeld nog gaat importeren.

Producent	Alstand		10			N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	Advected		Alla and			And the second se	
Model	Tarve P	1000				and the second se	
	Parenesettis-school.	1.5				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	Hoom/les-asfericiteit					Contraction of the local division of the loc	
Diamatur (mm)	Partition >			1 Million and an array		and the second se	
	and the second se		1.30			and the second se	
Basissares -	Construction.	Carlos -	1 ( ) ( )		1. 1. 1. 1. 1.	Carlos Contractor	
	Pupil	CRIPTED	Discounting		1	Contraction of the second s	
	Limbus				1.1.1		
	Meridianen		1.1.1.1.1.1.1.1.1				
	3 zoner						
Aanpatsen	Linixlen						
	Rooter						
Optics	State of the local division of the local div					Martin Color	
	349					Sector Sector Sector	
Matchanen	2,0		$\sim 1000$			And the second	
T 3 Joney	Constant and the second		- 1111				
E Reater	Heri .						
	1 m m						
Liniation				a state of the sta	~ * * * *		
						and the second	
	2.71		200.00	and a state of the second			
CANTELEN Inch							
KANTELEN (seit	3,0		and the second	the second se			
EANTELEN (juni) 10 Refractie	3,41 3,41		1.100	- man			
EANTELEN (jen) 10 Refractie	Bun Bun Bun					1000	
EANTELEN (pro)	Bun Bun Bun Bun					1.10	
KANTELEN (pm) 10 Refractie Auto parsen	340 340 350 360 360 120						
XANTELEN (pro) 10 Refractie Auto pussen Producent	Bun Mun Bun Bun Uun	A# 1	<b>DPCON</b>				
KANTELEN (proj 10 Refractie Auto pussen Predacent	Bun Bun Bun Bun Bun Fun	#T	PCON				
KANTELEN (pre) TO Refractie Auto presen Producent Autobal	33 yrs 33 yrs 33 yrs 33 yrs 34	#1	opcon			erroufit	
EANTELEN (pas) 10 Refractie Auto parsun Prostacent Autobed	Starks Dave Stare Stare San Starkse (D)	<i>H</i> 1	Straal (nm)	Atstand (mm)	Hose	easyfit r₀	chts klaar voor imp
KANTELEN (pre) TO Refrectie Auto parsen Producent Archiel	Bur Bur Bur Bur Bur Bur Bur Bur Bur Bur	<i>e</i> 1	Stroal (mm) + 8	Atsiand (mm) d=0	Hose 2 = 0	easyfit Re	chts klaar voor imp Open nu het an
KANTILLY (pre) 10 Refuectio Auto-pursen A	3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4/4 5/4 5/4 5/4 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2	æ 1	Stronl (mm) 1+ B	Alstand (mm) d=8	Hose I = 0	easyfit Re	<b>chts klaar voor imp</b> Open nu het an
AMUTELEN tent 10 Relactio Auto parson Producent Archief	3.0           3.0	ст iл	Strani (mm) + B	Alstand (nm) d=0	Hose 2 = 0 Diose	easyfit Re	chts klaar voor imp Open nu het an
KANTILLA' (pre) 10 Behastis Anto parsen Predecent Anchel Oprimer taknen	3 Jun 3 Jun 3 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Units (D) D + 0 Starkts (D) D + 0 Starkts (D) D + 0 Starkts (D) D + 0 Starkts (D) Starkts	ст 17 18	DCOIL Staal (mn) +8	Atsiand (mm) d=8	Hose 2 × 0 Dians 11,87 ×	ecsyfit Re Maak verschilbeelder	chts klaar voor imp Open nu het an Importeer alleen
AMUTLES (pell 10 Pedacet Pedacet Actor Pedacet Cyricus takanen	Jun       Jun   <	471 188 188	Strai (nm) (+8	Alstand (nm) d=8	Hose 2 = 0 Disse 11,97 +	ecisyfit Re Maak verschilbeelder	chts klaar voor imp Open nu het an Importeer alleen
KANTILLA (pel) 10 Pelaetie Auto parent Pelaetie Auto parent Auto	Jun	67 18 18	Stead (nm) (+2	Atstand (mm) d= 0	Hote 2 × 0 Diam 11,07 ×	eccsyfit Re	chts klaar voor imp Open nu het an Importeer alleen
KANTELLER (period) 10 Periodeceret Periodeceret Archieret Oprimume telehonen	Jun       Jun </td <td></td> <td>DCON Stoal (nm) (+8</td> <td>Atstand (nm) d=0</td> <td>Hoos z + 6 Diane 11.37 +</td> <td>ecisyfit Re</td> <td>chts klaar voor in: Open nu het a Importeer alle</td>		DCON Stoal (nm) (+8	Atstand (nm) d=0	Hoos z + 6 Diane 11.37 +	ecisyfit Re	chts klaar voor in: Open nu het a Importeer alle



Sluit vervolgens je scherm af door links bovenin je scherm op **Afbeeldingen** en daarna op **Sluiten** te klikken. Je komt weer in het startscherm van je metingen en selecteert nu een meting van het linkeroog. Vervolgens herhaal je stap 3 en 4.

Achtemaan	Geboortedature	Patient ID		
TESTPERSOON 10	4-4-1968			Contraction of the second
Nore				EAL AND
Ja	Patient station	Patiintgegevina		
			GEREEN OD	00
27-2-2821 CA-280 F			A DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY.	ALC: NOT
27-2-2821 CA-200 F 27-2-2821 CA-200 F			and the second se	1000
			And Provide State	
Nieuw anderstek		Witten		
			60	40
Faturabilitari (22.0.1014) [15.52		-	The second s	A Contraction
ondwoole Sout-ondersell (C.A. 200 E			177 A	196 33
Dagoon		#		
Course				and the second sec
Paulaban			85	05
			The second s	A STREET STREET
				ALC: NA

Nadat je stap 3 en 4 hebt herhaald, kun je beide topobeelden importeren in Easyfit.



Je topobeelden zijn geïmporteerd en je kunt aan de slag.

