


Topcon MYAH topograaf - koppelen en gebruiken

Gedeelde map maken

Om deze topograaf te gebruiken, moet u eerst een gedeelde map maken. Dit doet u als volgt.

Maak een nieuwe map op een lokale schijf op uw pc. Dit wordt de map waar de meetgegevens van een patiënt uit de Topcon MYAH naartoe worden geëxporteerd.


Klik met de rechtermuisknop op deze map en kies '**Eigenschappen**'. Selecteer het tabblad '**Delen**' (A). Op dit tabblad ziet u onder de sectie '**Netwerkbestand en mappen delen**' (B) dat deze map niet wordt gedeeld.

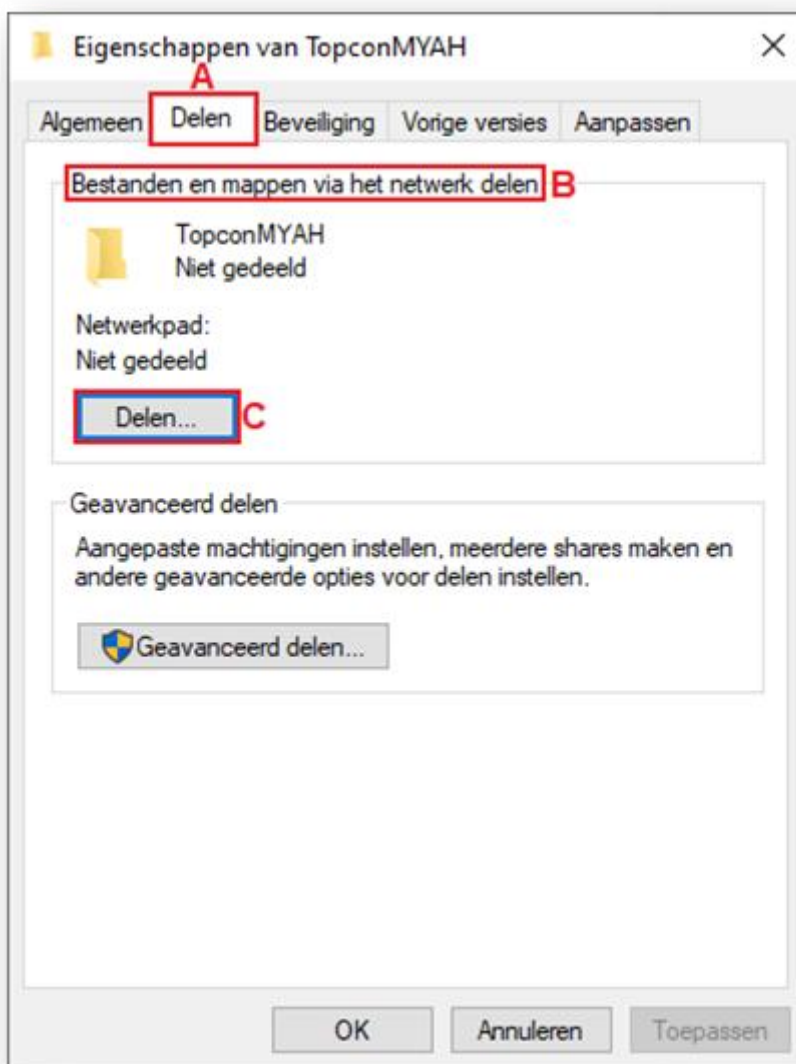

Klik op '**Delen...**' (C).


Zoek in het weergegeven pop-upvenster naar '**Iedereen**' en klik op '**Toevoegen**' (D).

'Iedereen' is in de lijst verschenen, klik op **'Toestemming'** (E) en selecteer **'Lezen/Schrijven'** (F).

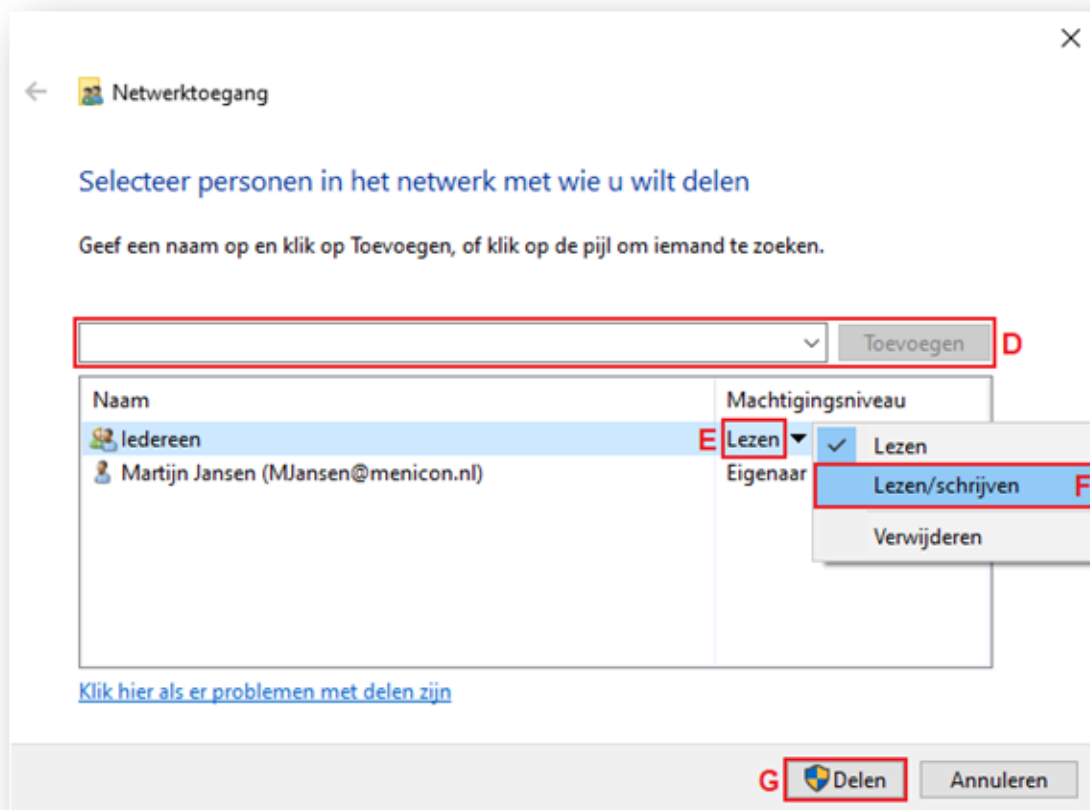

Klik op **'Delen'** (G).

Er verschijnt een bevestigingsvenster met de melding dat de map wordt gedeeld.
Onthoud de locatie waarnaar de map wordt gedeeld (H).

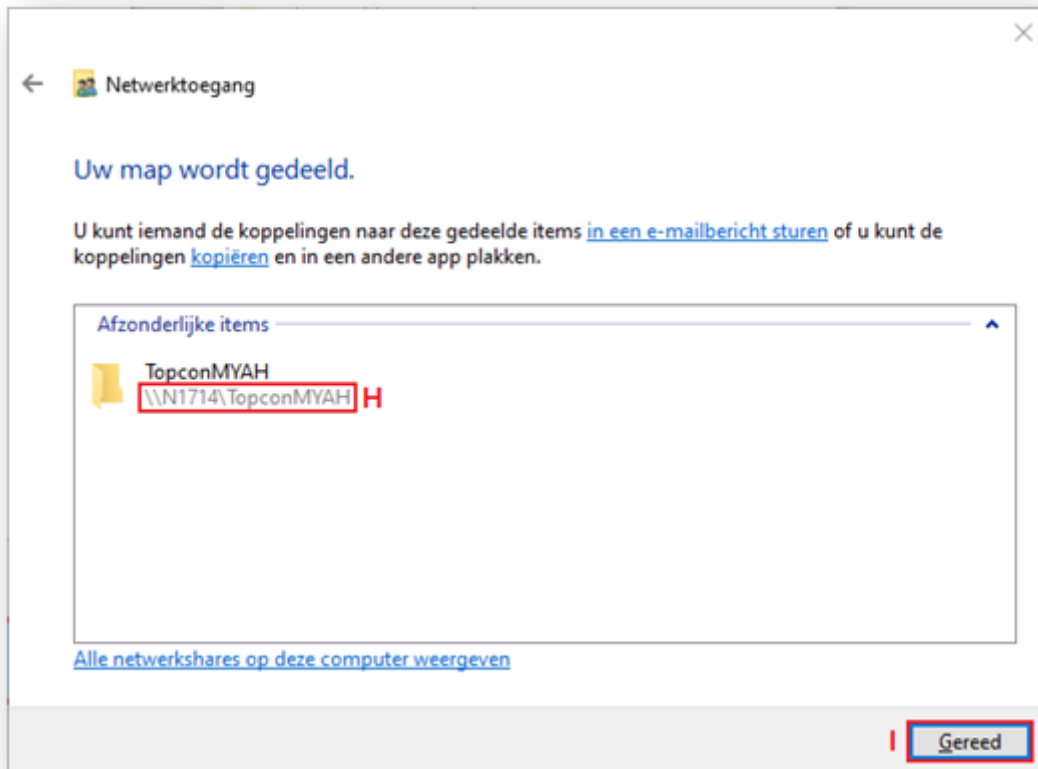

Klik op '**Gereed**' (I)


De Topcon MYAH verbinden met de gedeelde map

Selecteer in de Topcon MYAH het gereedschapspictogram (A) in de rechterbovenhoek van het scherm. Hiermee wordt het instellingenscherf geopend.

Klik in het instellingenscherf op het tabblad '**Connectiviteit**' (B) en vervolgens op '**Configureren**' (C) onder de sectie '**Exporteren naar externeSW**'.

Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend. Vink het selectievakje naast '**Menicon / Easyfit**' (D) aan en ga vervolgens naar de bijbehorende '**Configure**' (E).

In het volgende scherm kunt u de netwerkmap configureren om naar te exporteren, vink hiervoor de optie '**Netwerkmap**' aan (F).

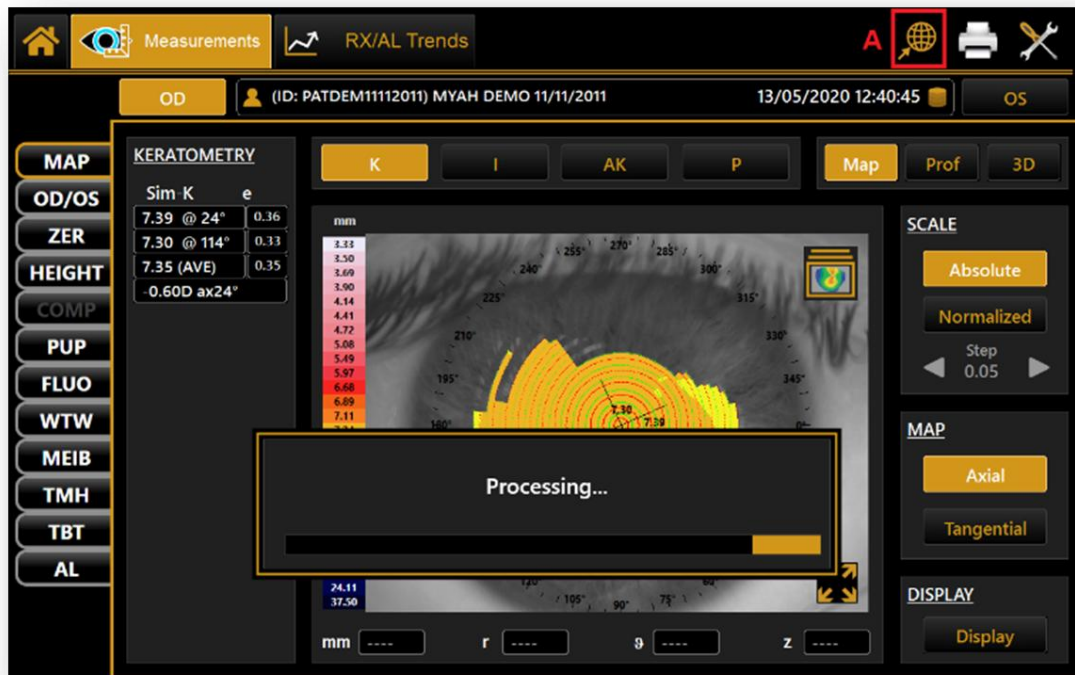


Gegevens importeren in Easyfit

Open Easyfit

Ga naar het instellingenmenu (A) en vervolgens naar het tabblad Topograaf (B).

Selecteer de '**Topcon MYAH**' topograaf (C).

Klik op '**Ok**' (D).

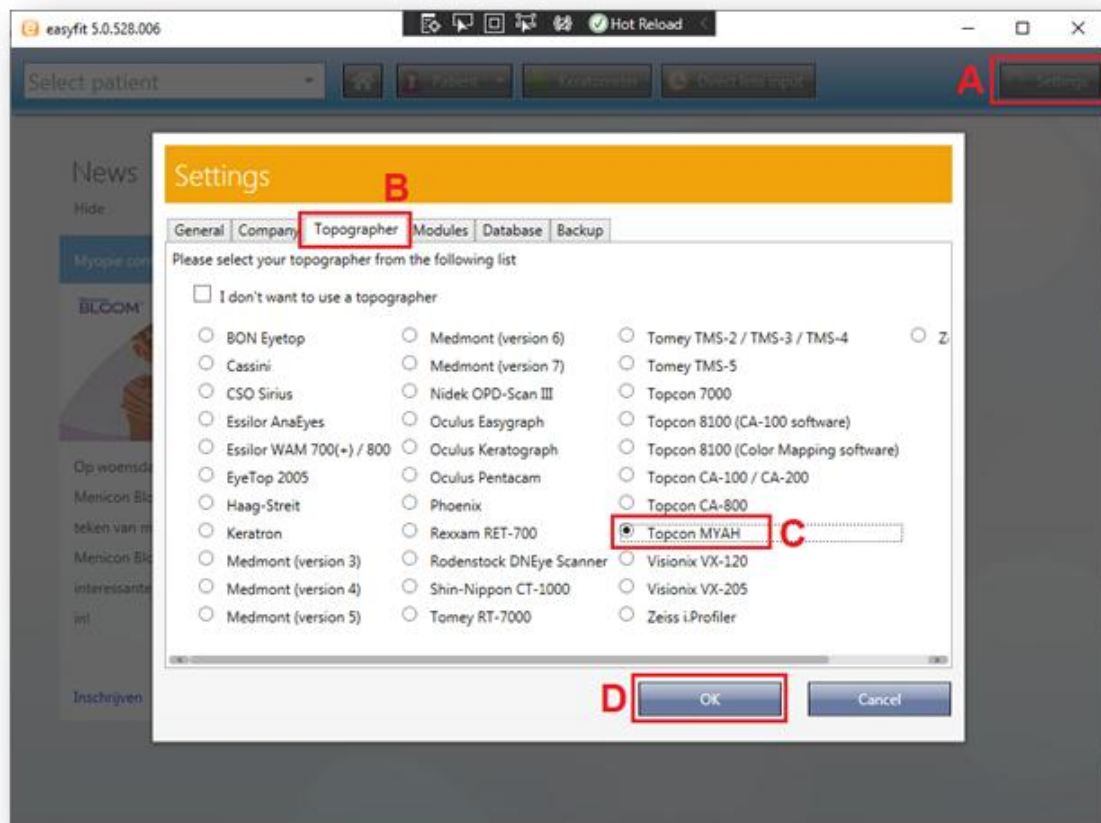

Klik in de Toolbar op het '**Topcon**' icoontje (E)

Klik op de gewenste patiënt (F)

Klik op de gewenste meting (G)

Klik op '**Importeren**' (H).

